

ZOLL®

LifeBand® belastingsverdelingsband

Productbijlage


De LifeBand belastingsverdelingsband bestaat uit een afdekplaat en een band met geïntegreerd hartmassagekussen. Nadat de LifeBand is aangesloten op het AutoPulse-platform, wordt deze automatisch door het platform op de patiënt afgesteld en wordt de borst van de patiënt bij het hart samengedrukt.

Het AutoPulse-systeem gereedmaken voor gebruik


Na elk gebruik bij een patiënt moet een nieuwe LifeBand worden gemonteerd. In deze productbijlage wordt het aanbrengen en verwijderen van de LifeBand stapsgewijs beschreven. Lees de gebruikershandleiding voor het AutoPulse-reanimatiesysteem Model 100 en de gebruikershandleiding voor het AutoPulse-voedingssysteem door voordat u het AutoPulse-systeem gaat gebruiken.


 **Voorzichtig:** de LifeBand is voor eenmalig gebruik.

Inlichtingen:

 ZOLL Circulation
2000 Ringwood Avenue
San Jose, CA 95131 USA

t: +1.800.321.4CPR (4277)
t: +1.408.541.2140
f: +1.408.541.1030

 ZOLL Medical Switzerland
A.G. Bahnhofstrasse 20
6300, Zug Switzerland

 Geautoriseerde vertegenwoordiger
in de EU
ZOLL International Holding B.V.
Einsteinweg 8A
6662 PW ELST
The Netherlands




ZOLL Circulation ©2022 Printed in USA

De LifeBand verwijderen

1


Klap de LifeBand-scharnieren open

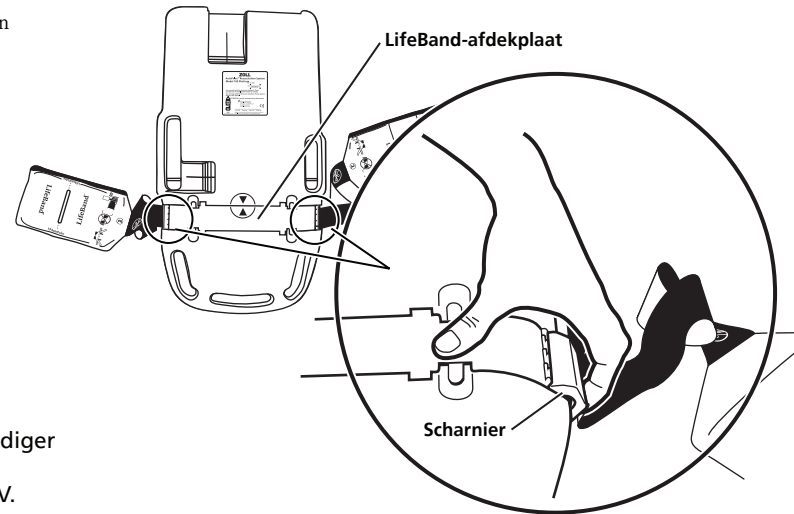

1. Plaats het AutoPulse-platform met het patiëntoppervlak naar beneden op een vlakke ondergrond.
2. Klap de LifeBand-scharnieren open om de LifeBand-borstbanden van de rollen los te koppelen. Het scharnier klikt hoorbaar in de opengeklapte positie. Dit is normaal.

2


Druk de LifeBand-vergrendelingslipjes samen

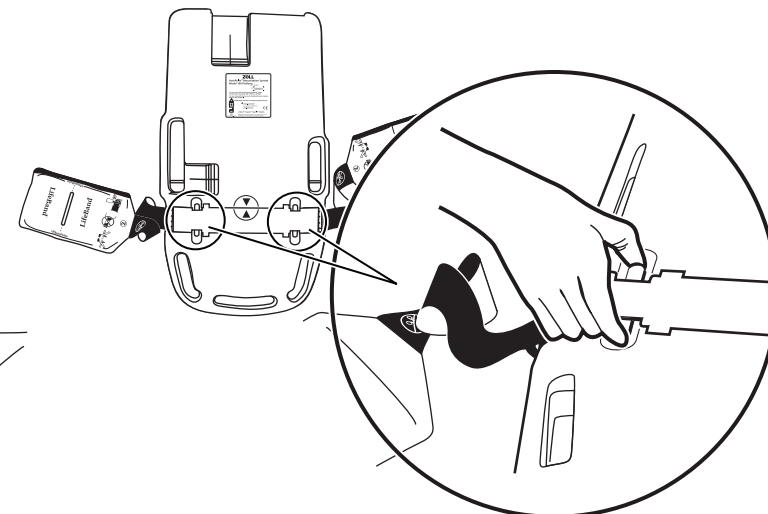

1. Druk de vergrendelingslipjes van de LifeBand-afdekplaat met beide handen samen en trek de plaat met enige kracht omhoog en weg van het AutoPulse-platform.

3

Verwijder de LifeBand van het AutoPulse-platform

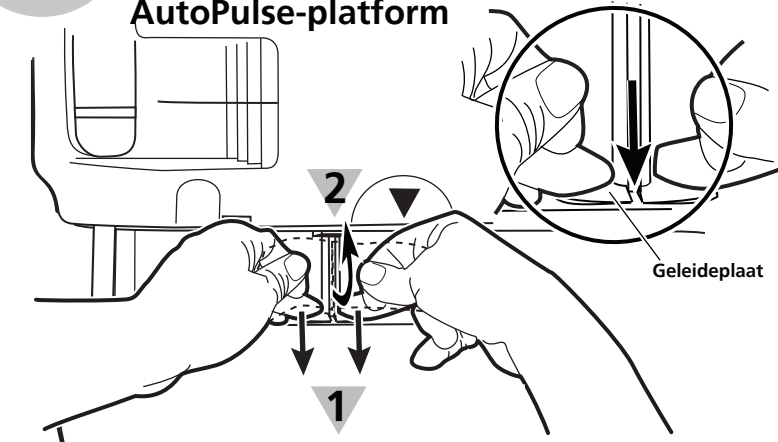


1. Draai de aandrijfas zo dat de gleuf zich aan de bovenkant bevindt.
2. Pak de LifeBand-borstbanden aan beide kanten van de LifeBand-clip met beide handen tussen duim en wijsvinger vast. **1** Druk de geleideplaat er met beide middelvingers in. Houd de geleideplaat in positie en trek **2** de LifeBand naar boven om de clip van de as te verwijderen.
3. Gooi de gebruikte LifeBand weg. De LifeBand is voor eenmalig gebruik en moet na elk gebruik bij een patiënt worden vervangen. Behandel de LifeBand als besmet medisch afval en voer deze volgens de betreffende voorschriften af. De LifeBand bevat geen onderdelen waarop onderhoud kan worden uitgevoerd.
4. Vervang de LifeBand volgens de onderstaande procedure: *De LifeBand monteren.*

De LifeBand monteren

1

Schuif de LifeBand-clip in de sleuf van de aandrijfas

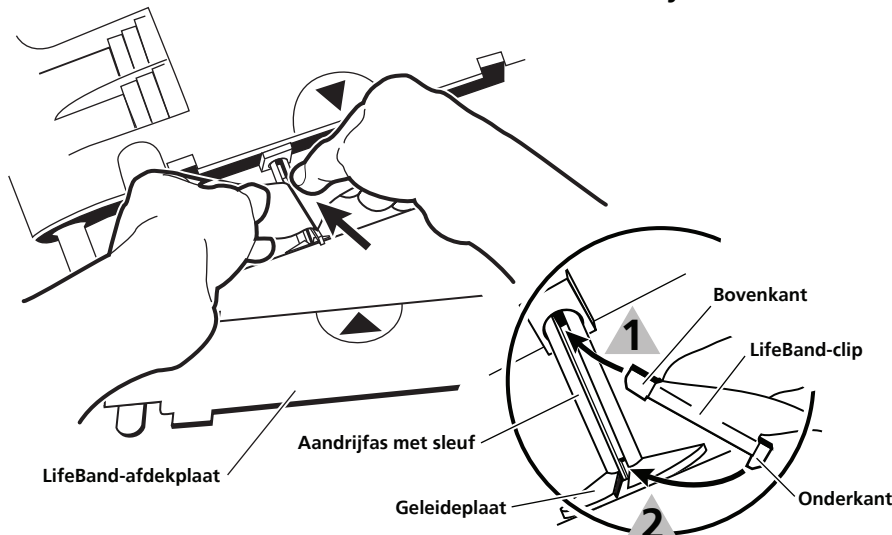


1. Plaats het AutoPulse-platform met de patiëntzijde naar beneden op een vlakke ondergrond.
2. **1** Steek de bovenkant van de LifeBand®-clip in de sleuf van

de aandrijfas in de richting van de markeringspijl van de LifeBand-afdekplaat op het platform.

2


Plaats de LifeBand-clip

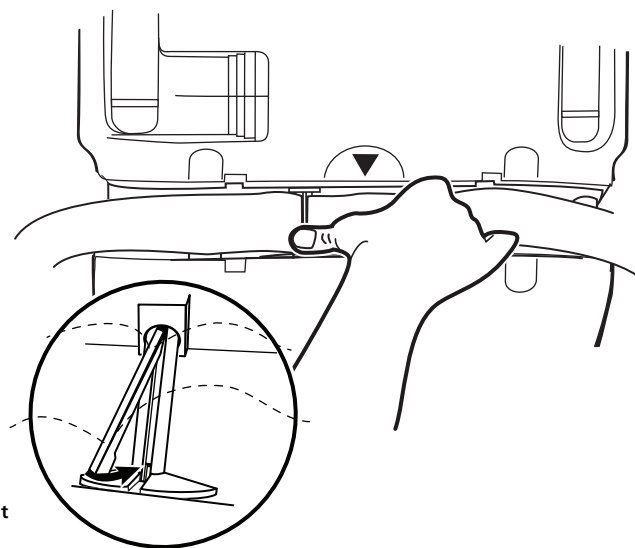

1. **2** Druk de bovenkant van de LifeBand-clip in de sleuf van de aandrijfas tot de clip helemaal in de aandrijfas is geplaatst. De LifeBand-clip klikt voelbaar op zijn plaats.
2. Draai de aandrijfas handmatig een beetje in beide richtingen om te controleren of de LifeBand-clip correct is geplaatst.

3


Klik de LifeBand-afdekplaat vast

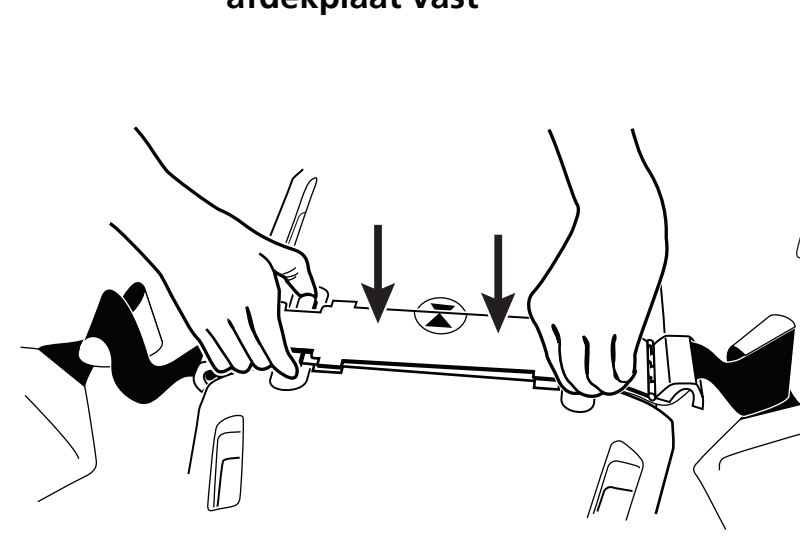

1. Zorg ervoor dat beide vrije uiteinden van de LifeBand-borstband vlak (niet gedraaid) en weg van het AutoPulse-platform liggen.
2. Plaats de pijl op de LifeBand-afdekplaat en de pijl op het platform tegenover elkaar.
3. Klik de LifeBand-afdekplaat vast door de vergrendelingslipjes in de sleuven van het AutoPulse-platform te steken.

4

Klap de scharnieren van de LifeBand naar beneden en controleer de montage

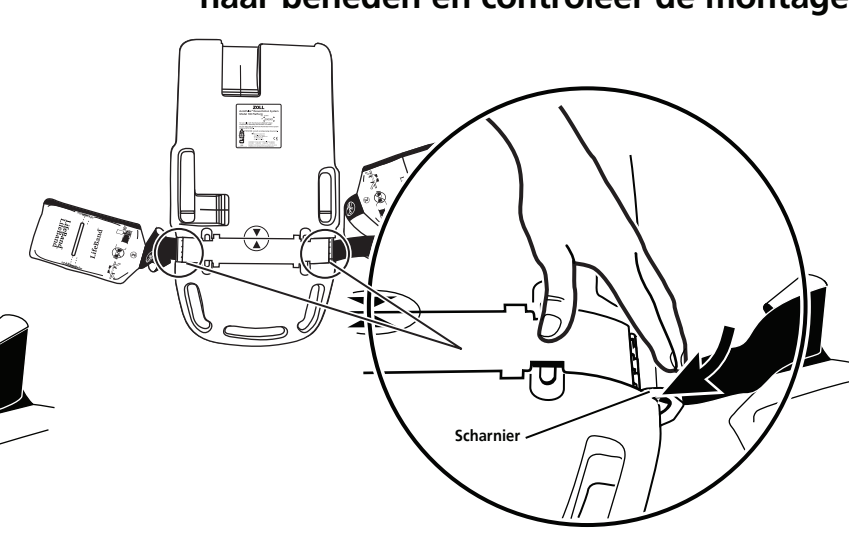

1. Klap de scharnieren van de afdekplaat van de LifeBand naar beneden en klik deze vast om de borstbanden van de LifeBand op de rollen vast te zetten.
2. Draai het AutoPulse-platform om

en druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Controleer de montage van de LifeBand-clip in de sleuf van de aandrijfas als het op het bedieningspaneel een fout wordt gemeld. Zie **2**.