

10 Bij schok afgeraden of na schok toegediend: "Start de reanimatie"

Tijdens borstcompressies worden op de ZOLL AED 3 Real CPR Help®-meldingen over de kwaliteit van de compressies gegenereerd

1 Zet de AED aan

9 Bij schok aangeraden: "Druk op knipperende schokknop"

2 "Controleer het bewustzijn"

3 "Vraag om hulp"

8 "Raak de patiënt niet aan. De analyse wordt uitgevoerd"

7 "Elektroden bevestigen op de ontblote borstkas van de patiënt"

6 "Als de patiënt een kind is, druk dan de Kindknop in"

5 "Controleer de ademhaling"

4 "Open de luchtweg"



Ga voor meer informatie over de ZOLL AED 3 naar zoll.com/aed3.

ZOLL®