

1 Lieferung auspacken

2 Pumpen Tasten/Bedienung

Durchflussrate wählen Alarme Pumpen Status

Start / Stopp Ein / Aus

3 AAA Batterien einlegen

4 Verbindungen Beutel, Kartusche IV-Sets herstellen

5 Kartusche einlegen

6 Einschalten, IV-Set vorfüllen und Luftentfernung

Hinweis: Pumpe abkippen, Klopfen auf die Kartusche zur Luftentfernung

7 IV-Flüssigkeiten infundieren

IV-Set am Patientenkath. befestigen 18 G optimal für Kristalloide*

BOLUS 250cc in 2,5min

Durchflussrate einstellen

6 L/h, 4 L/h, 2 L/h, 1 L/h, 0.2 L/h

BLUT (with prohibition sign) **MEDIKAMENTE** (with prohibition sign)

8 IV-Beutel wechseln

Hinweis: Klemme am IV-Set vor Wechsel schließen

9 Infusion beenden

10 Freier Durchfluss falls gewünscht

2 Kartusche ist Einmal-Verbrauchsmaterial

Ausführliche Gebrauchsanweisungen, Hinweise und Spezifikationen finden Sie im Power Infuser Bedienungshandbuch.

*Gilt für Infusionen mit kristalloiden IV-Flüssigkeiten bei Nutzung der Kristalloid-/Kolloid Kartusche. Eine separate Blutkartusche ist ebenfalls erhältlich; siehe Bedienungshandbuch für weitere Informationen zum Einsatz dieser unterschiedlichen Kartuschen.