

Thermogard XP®

REINIGINGSVOORSCHRIFTEN



Reinigingsprocedure voor de Thermogard XP

- Controleer of de console is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Reinig de buitenkant van de console met een zachte doek met een mild schoonmaakmiddel en watermengsel.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen om de console te reinigen. Vermijd hard schrobben, vooral op de voorzijde van het scherm.
- Voor algemene ontsmetting en reiniging raden wij aan antibacteriële wegwerpdoekjes te gebruiken met ten minste 55% isopropylalcohol of een andere goedgekeurd niet-corrosief desinfectiemiddel voor ziekenhuisgebruik.
- ZOLL raadt u ten eerste aan het desinfectiemiddel eerst uit te proberen op een klein gebied op de buitenkant van de console, voordat u het gebruikt op alle oppervlakken van de console. Ga te werk volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het desinfectiemiddel.
- Veeg na het reinigen de buitenkant af met een met water bevochtigd doekje om achtergebleven vlekken of restjes schoonmaakmiddel te verwijderen.
- Schuif de opvangbak voor condensaat onder de voorzijde van de console uit en verwijder deze. De opvangbak kan worden gewassen met heet zeepwater. Gebruik nooit oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen om de opvangbak te reinigen. Droog na het schoonmaken de opvangbak af en schuif hem weer op zijn plaats in de console.

Opmerking: Gebruik de console niet zonder dat er een opvangbak op de juiste manier onder is geïnstalleerd. Als dit toch gebeurt, kan er een plas water op de vloer onder de console worden gevormd.

- Raadpleeg de gebruikshandleiding van de Thermogard XP voor instructies voor het vervangen van de koelvloeistof en voor de volledige instructies voor reiniging en gebruik.

Producten voor het reinigen van de Thermogard XP

- Doekjes met 70% isopropylalcohol
- Antibacteriële doekjes met bleekmiddel
- Warm water en zeep